

Manekin szkoleniowy **Baby Anne**



Dystrybutor:

MedBon – Sklep Medyczny

M. Grześkowiaka 28/2

62-035 Kórnik

Tel: 883 113 112

Tel: 783 578 128

E-mail: sklep@medbon.pl

FAX: (61) 648 26 10

www.medbon.pl

Instrukcja obsługi

Baby Anne

Serwis

Manekin szkoleniowy do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej u niemowląt Baby Anne składa się z kilku głównych podzespołów, których wszystkie części wymienne mogą być przedmiotem zabiegów serwisowych dokonywanych na miejscu u użytkownika. Części zamienne można łatwo zidentyfikować, korzystając z rysunku rozłożonego manekina i wykazu części.

Manekin można bardzo łatwo rozmontować i ponownie złożyć, dlatego wszystkie naprawy i zabiegi konserwacyjne mogą być wykonane przez użytkownika. W razie pojawienia się problemów pracownicy firmy LMP Sp. z o.o. chętnie służą pomocą.



Manekin Baby Anne został skonstruowany jako oszczędna alternatywa dla pediatrycznych programów nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Można używać więcej manekinów w sali zajęciowej, dzięki czemu uczniowie mają więcej okazji do ćwiczeń manualnych i bardziej aktywnie uczestniczą w zajęciach. Manekin spełnia wszelkie niezbędne wymogi szkoleniowe zapewniające odpowiednią jakość szkolenia.

Zestaw Baby Anne jest również idealny jako manekin szkoleniowy dla osób chcących odświeżyć swoje umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zarówno pomiędzy kursami, jak i w ramach programów szkolenia domowego. Baby Anne odzwierciedla typową fizjologię i anatomię trzymiesięcznego niemowlęcia, a jego konstrukcja umożliwia realistyczne nauczanie podstawowych umiejętności reanimacyjnych, przede wszystkim w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz usuwania obcych ciał z dróg oddechowych. Oto niektóre właściwości manekina pomocne w skutecznej nauce i umożliwiające szkolenie w pełnym zakresie przewidzianym w protokole resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci:

- Naturalna niedrożność dróg oddechowych
- Realistyczne rysy twarzy i ruchoma żuchwa
- Realistyczna podatność przy wentylacji i uciśnięciach
- Unoszenie się i opadanie klatki piersiowej przy wentylacji
- Realistyczne oznaczenia położenia miejsc uciśnięć
- Symulacja zadławienia / zatoru dróg oddechowych spowodowanego obecnością obcego ciała


Rozpakowanie

Pojedyncze opakowanie Baby Anne zawiera:

Manekin Baby Anne

6 sztuk dróg oddechowych Baby Anne
torbę
instrukcję obsługi
10 atrap obcych ciał używanych w nauce usuwania niedrożności dróg oddechowych.

Manekiny w opakowaniach poczwórnych są dostarczane z jedną torbą i jednym egzemplarzem instrukcji; pozostałe akcesoria – jw.

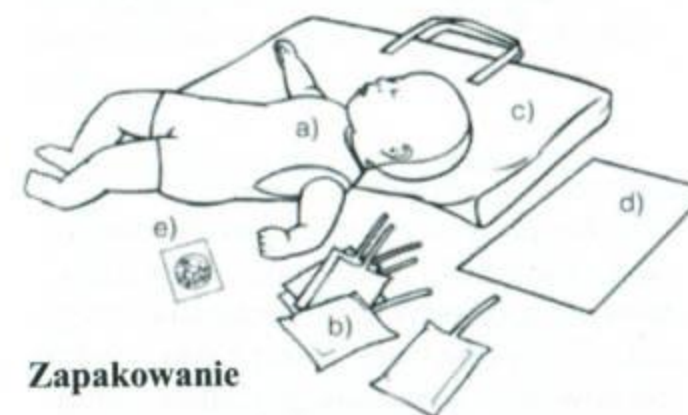

Zapakowanie

Nie należy przechowywać manekina z zainstalowanymi drogami oddechowymi, gdyż długotrwałe zamknięcie rurek dróg oddechowych może doprowadzić do ich trwałej deformacji.



Pakując manekiny w opakowaniu poczwórnym, należy ułożyć je tak, jak na rysunku

Wskazówki dotyczące użycia i konserwacji

Montaż

Uwaga: Manekin Baby Anne jest dostarczany bez zainstalowanych dróg oddechowych. Należy je zainstalować przed użyciem.

1. Otworzyć pokrywę klatki piersiowej.



2. Zdjąć maskę twarzową, odpinając z dwóch zaczepów znajdujących się z tyłu głowy.




Baby Anne

3. Zainstalować drogi oddechowe, wciskając rurkę dróg oddechowych w złączkę twarzową. Ustawić w jednej linii płuco z maską twarzową.




4. Zainstalować ponownie zespół maski twarzowej / dróg oddechowych. Kolki na żuchwie należy wprowadzić w odpowiednie otwory w głowie.

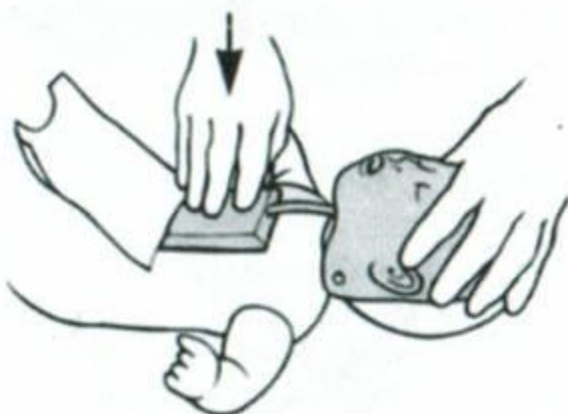

5. Umieścić płuco w zagłębieniu klatki piersiowej. Upewnić się, czy rurka dróg oddechowych

nie jest zagięta lub skręcona. Zamknąć pokrywę klatki piersiowej.

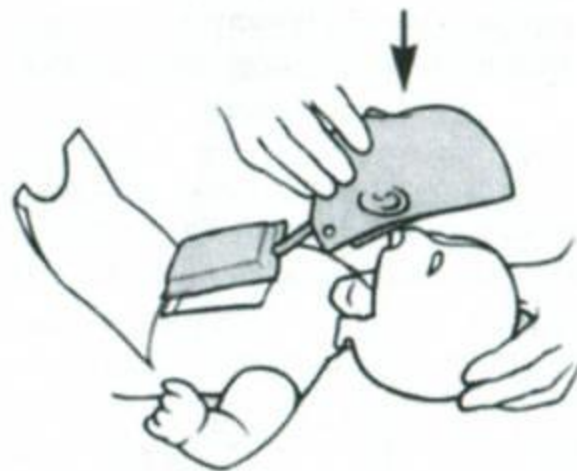

Ćwiczenia w usuwaniu obcych ciał Manekin Baby Anne umożliwia ćwiczenie zabiegu usuwania niedrożności dróg oddechowych spowodowanej obecnością obcego ciała. Uciśnięcie worka płuca z odpowiednią siłą powoduje wydalenie przedmiotu imitującego obce ciało ze złączki twarzowej, można zatem ćwiczyć zarówno uderzenia w plecy, jak i w klatkę piersiową.

Uwaga: należy pamiętać, że podczas zabiegu drogi oddechowe muszą pozostać otwarte, a głowa odchylona.

Po zakończeniu zabiegu usuwania należy sprawdzić, czy atrapa została wydalona do jamy ustnej. Przedmiot, który nie utkwiał w drogach oddechowych, należy usunąć palcem. Jeśli po sprawdzeniu i kolejnych krokach procedury okaże się, że drogi

oddechowe są nadal zatkane, należy powtórzyć czynności.

Jak zainstalować „atrapę imitującą obce ciało”

Włożyć atrapę do zagłębienia w złączce twarzy, wsuwając najpierw jeden z płaskich końców.

UWAGA: nie należy nadmiernie ścisnąć atrapy, aby jej nie zdeformować.

Do ćwiczeń należy używać tylko atrap dostarczonych wraz z manekinem. Inne przedmioty mogą nie pasować do manekina i uniemożliwić stosowanie właściwych technik.

UWAGA: atrapy należy trzymać z dala dzieci.



Po zajęciach

Po zajęciach należy usunąć użyte atrapy.

Higiena

W trakcie zajęć


Zalecamy, aby każdy uczestnik zajęć dysponował własnym manekinem. Jeśli kilku uczestników szkolenia używa manekina w trakcie zajęć, każdy z nich powinien posiadać zespół maski twarzowej / dróg oddechowych.

W obu wypadkach nie jest konieczne czyszczenie manekina po zajęciach. Każdy student w grupie powinien sam założyć maskę twarzową na manekin.


Instalacja indywidualnego zespołu maski twarzowej / dróg oddechowych

Zdjęcie


1. Otworzyć pokrywę klatki piersiowej.

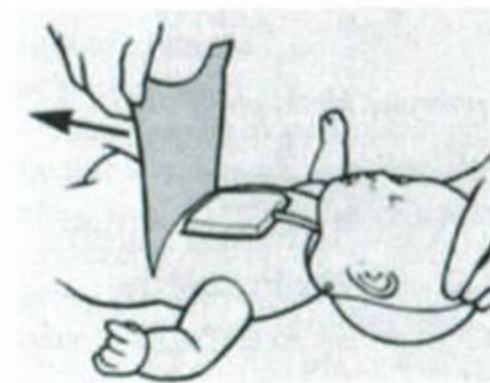

2. Odpiąć maskę twarzy z dwóch zaczepów z tyłu głowy

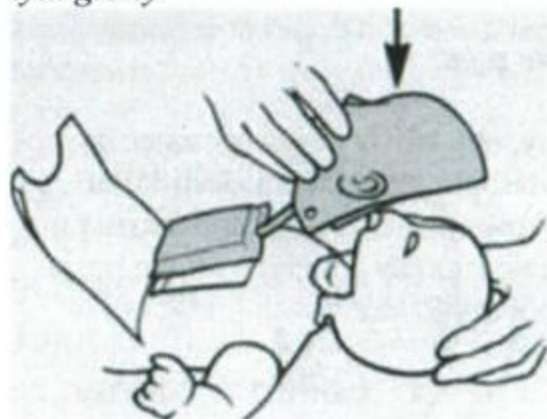


3. Unieść zespół maski twarzowej / dróg oddechowych.

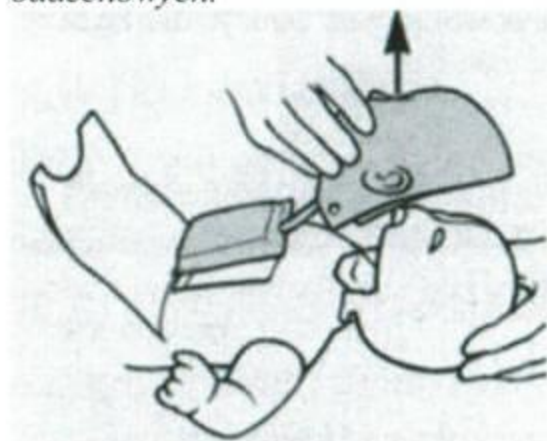


Założenie


1. Otworzyć pokrywę klatki piersiowej.

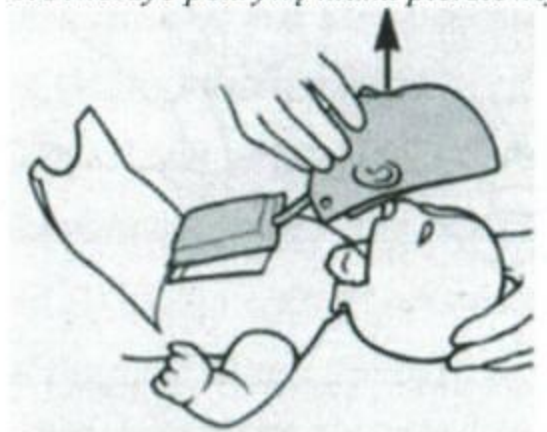

2. Zamocować maskę twarzową na zaczepach

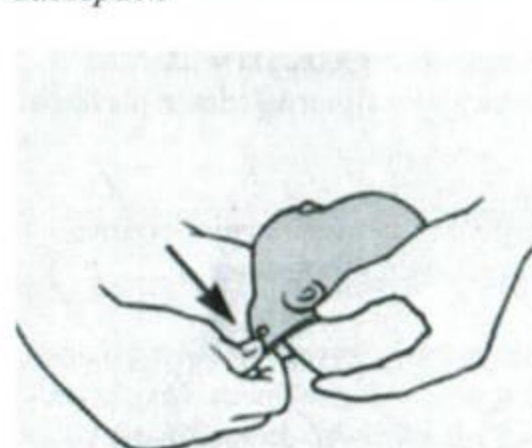

3. Umieścić płuco w zagłębieniu klatki piersiowej. Zamknąć pokrywę klatki.

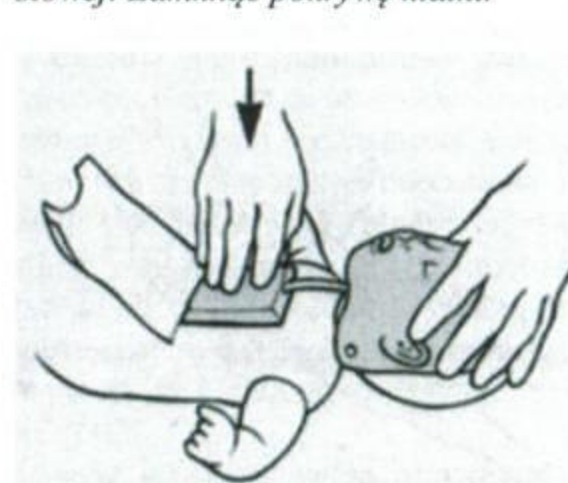

Po zajęciach

Używaną powłokę twarzową manekina można po zajęciach wyrzucić lub użyć ponownie.

Uwaga: Zabieg czyszczenia należy wykonywać w rękawicach.*

1). Zdjąć zespół maski twarzowej / dróg oddechowych:

- Otworzyć pokrywę klatki piersiowej.
- Odpiąć maskę twarzy z zaczepów z tyłu głowy.
- Unieść zespół maski twarzowej / dróg oddechowych.
- Odłączyć rurkę dróg oddechowych ze złączki twarzy. Wyrzucić tylko drogi oddechowe.
- Zatrzymać pozostałe części.
- Wyjąć żuchwę z zespołu maski twarzowej.
- Odłączyć złączkę twarzy od maski twarzowej.



2.) Oczyszczyć i zdezynfekować maskę twarzową i złączkę twarzy:

- Przemyć w ciepłej wodzie z mydłem – energicznie przetrzeć powierzchnie wewnętrzne.
- Przepłukać w czystej wodzie, aby usunąć resztki mydła.
- Zdezynfekować twarz manekina: Roztwór podchlorynu sodu świeżo przygotowany dla pojedynczego użycia jest skutecznym i zalecanym środkiem dezynfekcyjnym. Roztwór powinien zawierać co najmniej 500 cz./mol wolnego chloru, tj. 1 część domowego wybielacza na 100 części wody z kranu. Zanurzyć części w roztworze dezynfekcyjnym na co najmniej 10 minut. **

d) Przepłukać w czystej wodzie, aby usunąć resztki roztworu.

3.) Pozostawić części do wyschnięcia.

4.) Złożyć manekin w celu składowania lub transportu.

a) Zamocować złączkę twarzy na masce twarzowej. Należy pamiętać, że wylot złączki powinien być skierowany w dół.

b) Przymocować żuchwę do zespołu maski twarzowej.

c) Zainstalować maskę twarzową na głowie manekina. Kołki na żuchwie powinny wejść w otwory na głowie.

d) Zamknąć pokrywę klatki piersiowej.



Ogólne czyszczenie manekina

Nie jest wymagana rutynowa dezynfekcja całego manekina, jednak zaleca się okresowe czyszczenie głowy, torsu, skóry zewnętrznej i torby. Twarde elementy plastikowe należy wytrzeć do czysta ciepłą wodą z

dodatkiem mydła, a następnie przetrzeć czystą wilgotną ściereczką. Korpus z tkaniny należy czyścić tylko wilgotną ściereczką,

Baby Anne

używając w razie potrzeby łagodnego detergentu. Nie moczyć zbyt długo tkaniny korpusu, aby wyściółka nie nasiąkła wilgocią.

Kombinezon z płytką żeber należy prać ręcznie lub maszynowo w ciepłej wodzie (maks. 40°C) z dodatkiem mydła lub detergentu. Należy pamiętać, że suszenie gorącym powietrzem może spowodować skurczenie ubioru.

- * Używać rękawic winylowych. Rękawice lateksowe mogą pozostawić plamy na masce twarzowej.
- ** Zgodnie z zaleceniami JAMA, Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Ośrodka Zwalczania Chorób (CDC).

Specyfikacja

05 00 00	Baby Anne z torbą
05 00 10	Cztery manekiny Baby Anne z torbą

Części:

05 01 00	Drogi oddechowe, opak. 24 szt.
05 02 00	Maski twarzowe ze złączką, opak. 6 szt.
05 03 00	Atrapy obcych ciał, opak. 10 szt.
05 04 00	Żuchwa
05 05 00	Złączka twarzy
05 06 00	Torba na jeden manekin
05 06 10	Torba na cztery manekiny
05 07 00	Kombinezon z płytką żeber

05 05 00



05 04 00



05 01 00




05 02 00




05 03 00



05 07 00

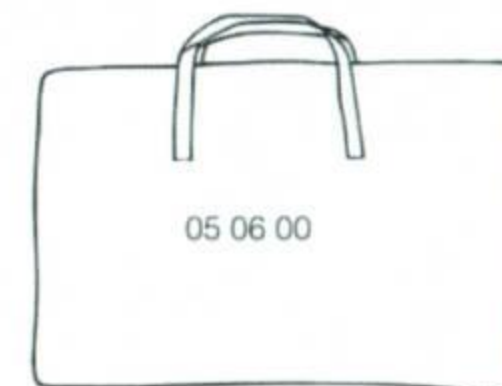

05 06 00

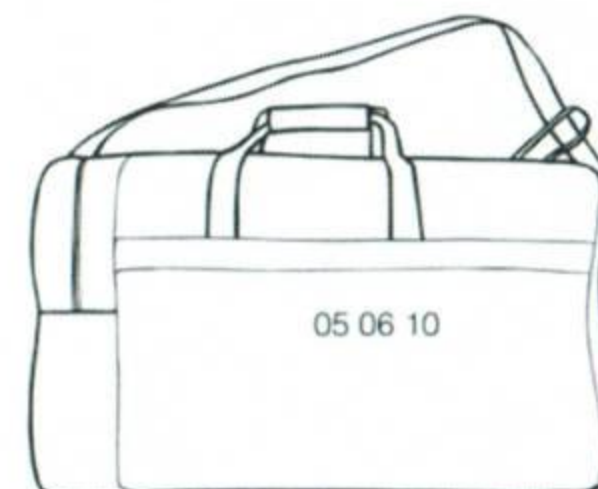

05 06 10